

Genumedi® PT

Knienelenkbandage zur Patellaführung
 Knee support for guiding the patella
 Genouillère pour le guidage de la rotule
 Rodillera para el guiado de la rótula

Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d'emploi. Instrucciones de uso.
 Instruções de uso. Istruzioni per l'uso. Gebruiksaanwijzing. Brugsvejledning.
 Bruksanvisning. Návod k použití. Uputa za uporabu. Инструкция по использованию.
 Kullanma kılavuzu. Instrukcja zakładania. Οδηγία εφαρμογής. Használati útmutató.
 Інструкція з використання.



1



4



2



5



3

Genumedi® PT

Назначение

Genumedi PT представляет собой коленный бандаж для контроля траектории движения надколенника. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения колена; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже.

Области применения

- Болевой синдром надколенно-бедренного сустава
- Неправильное положение или смещение коленной чашки
- Гипермобильность коленной чашки
- нестабильность коленной чашки
- 2-й этап после операции по стабилизации коленной чашки
- Повреждения перехода хряща в кость
- Повреждение хрящевой ткани
- Синовит
- Тендинит в месте прикрепления сухожилия к кости/тендинит разгибательного аппарата
- Синдром медиопателлярной складки

перед применением изделия в следующих случаях:

- Повреждения кожи в области соприкосновения с изделием, особенно в случае наличия признаков воспаления (повышенная температура, опухоль или покраснение).
- Нарушения чувствительности или кровоснабжения предплечья или кисти.
- Нарушения лимфатического оттока и опухоли мягких тканей ноги неизвестного происхождения. Также следует проконсультироваться с

доктором в случае, если Вы собираетесь комбинировать Genumedi с другими компрессионными изделиями.

В принципе, бандажи и ортезы, прилегающие к туловищу слишком плотно, могут быть причиной местного сдавления тканей, либо, что бывает значительно реже, сужения кровеносных сосудов или ущемления нервов.

Принцип действия/указание по ношению

Компрессионный бандаж способствует кровообращению и в сочетании с интегрированной подушкой создает для коленной чашки массажный эффект, ускоряющий рассасывание отеков и выпотов. Вшитая система подушек обеспечивает легкое перемещение коленной чашки. Массаж или давление подушек также положительно воздействует на мышцы бедра, отвечающие за движения коленного сустава. В результате улучшается подвижность коленной чашки относительно синовиального влагалища сухожилия. Давление можно настраивать индивидуально с помощью ремешка.

Максимальная эффективность бандажа достигается во время физической активности. Бандаж можно носить целый день. Но нужно прислушиваться к своим ощущениям во время его использования. Перед длительными перерывами (например, сидячей работой, поездкой в автомобиле или сном) бандаж следует снимать.

Если при пользовании изделием у Вас возникли боль или неприятные ощущения, пожалуйста, немедленно

снимите его и проконсультируйтесь у Вашего врача.

Надевание и снятие

- Расстегните ремешок. Затем возьмитесь большими пальцами за верхний край боковых лент бандажа с утолщениями (рис. 1).
- Потяните бандаж за верхние концы боковых спиральных стержней. Расположите бандаж так, чтобы надколенник охватывался силиконовым кольцом (рис. 2).
- Теперь застегните ремешок и настройте давление в соответствии со своими потребностями (рис. 3).
- Затем еще раз проверьте положение бандажа (рис. 4).
- Чтобы снять бандаж, расстегните ремешок, возьмите бандаж за боковые шины и стяните вниз (рис. 5).

В первый раз бандаж следует надевать после инструктажа, проведенного обученным специалистом.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами. Ополаскиватели, жиры, масла, лосьоны, мази и остатки мыла могут оказывать агрессивное влияние на материал, нарушить эффект Clima Comfort и привести к раздражению кожи.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean или в щадящем режиме стирки при температуре 30 °C с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

Полиамид, Полиэстер, эластан

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством.

Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застегивающие липучки.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!